

PrimaProtect

- Est un protecteur cutané **non irritant** pour la peau et les muqueuses, **non allergisant**. Il est **biocompatible**.
- Est un dispositif médical qui ne contient **pas de principe actif** au sens pharmacologique du terme.

APPLICATIONS INEFFICACES

- Positionnement du produit sur peau non sèche.
Une peau humide est un frein à la pénétration du produit.
- Positionnement du produit sur peau non propre.
Une substance indésirable présente à la surface de la peau peut être entraînée par le produit dans l'épiderme (effet drainant) d'où possible aggravation des troubles.
- Lavage de peau immédiatement après étalement du produit.
Le réseau n'a pas eu le temps de se positionner.
- Positionnement du produit insuffisant.
Une seule fois par jour, irrégulièrement, sur trop courte durée (2 ou 3 jours), interruptions, abandon.
- Malgré toutes les précautions, il se peut que dans quelques cas **PrimaProtect** ne donne pas les résultats escomptés...
- Dans ce cas consultez un professionnel de santé pour revoir le diagnostic.

COMPOSANTS: Aqua, Butane (and) Propane, Propylène glycol, Acide stéarique, Glycérine, Polysorbate 20, Dimethicone, émulsifiants.
(Sans parfum ni alcool)
(Sans parabènes ni conservateur)

60 ml

GTIN : 3 760066 49019 7

Développe environ 2 litres de
mousse



Tout spray entamé peut être
utilisé sans risque jusqu'à la date
de péremption

Fabriqué en France



Fabricant :
Métañoïa santé
2 rue Léon Patoux
51100 Reims



09 72 63 09 05

www.metanoiasante.com



Traitement des dermatites irritantes de contact

*Lésions cutanées liées à la
macération :*

- *Peau péri-lésionnelle (ulcère,
escarre, stomie)*
- *Dermite associée à
l'incontinence (DAI)*
- *Erythème fessier*



PROPRIETES

- Constitue un film hydrolipidique non perceptible, non occlusif, non gras au touché.
- N'empêche pas l'adhérence des pansements et/ou appareillages (après pénétration du produit).

SPÉCIFICITÉ D'ACTION

- Doux par son aspect, par sa galénique, par son innocuité, **Primaprotect** agit avec le temps et dans le temps, respectant le cycle naturel de la peau.
- N'entrave pas le fonctionnement normal de la peau.
- Renforce la résistance de l'épiderme à l'agressions des effluents corporels (urine, selles, exsudats, transpiration...) et des frottements.


PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Arrêter le traitement en cas d'intolérance (rougeurs, irritations, brûlures...)
- Eviter l'association avec des produits gras ou oléo-minéraux (liniments, talc, ...)
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants

INDICATIONS

- Traitement des dermites irritantes de contact.
- Lésions cutanées liées à la macération :
 - Peau péri-lésionnelle (ulcère, escarre, stomie)
 - Dermite associée à l'incontinence (DAI)
 - Erythème fessier

MODE D'ACTION

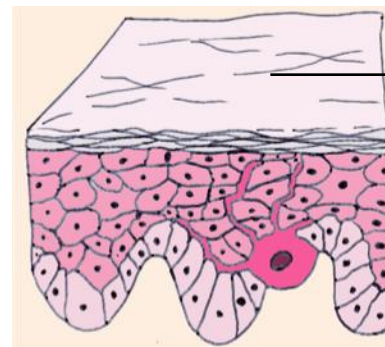

Constitution d'un film hydrolipidique
en réseau

Action protectrice
Action de renforcement de la cohésion cellulaire

Rétablissement de l'intégrité épidermique et de la fonction
barrière
Préservation de la régénération cutanée grâce à la protection
non-occlusive

MODE D'EMPLOI

- **Appliquer sur peau propre et sèche.**
- **A raison d'une à trois applications par jour.**
- Agiter avant emploi, incliner le flacon tête en bas et extraire une petite quantité de mousse en appuyant légèrement sur le diffuseur.
- Appliquer sur la zone à traiter par effleurement jusqu'à disparition visuelle du produit (absorption rapide).
- Si la zone est sensible ou abîmée, tapoter avec la boule de mousse pour déposer un peu de produit, attendre quelques instants, et effleurer pour compléter l'absorption.



PEAUX CONCERNÉES

- Utilisable sur toute la surface corporelle, y compris le visage.
- Peaux saines à très réactives de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson.
- **Soin sur peaux altérées ou lésées.**

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions sur l'étiquette.

Respecter les précautions d'emploi.

En cas de doute, consultez votre médecin spécialiste.