


RECAcare - Notice

Tampon obturateur anal pour la prévention de l'incontinence fécale.

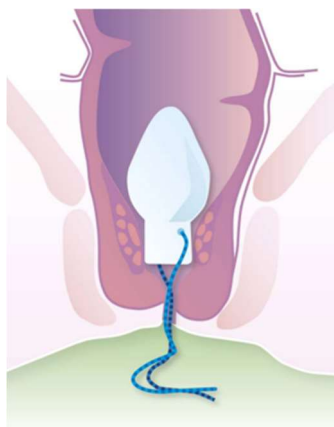

MétanoïaSanté



Mode d'emploi

- Lavez-vous les mains puis retirez le film protecteur
- Déroulez le cordon de retrait du tampon
- Faites tremper le tampon RECAcare dans de l'eau tiède, puis essorez-le
- Placez le tampon sur l'applicateur
- Adoptez une position confortable (allongez-vous sur le dos, ou surélevez une jambe par exemple : à l'aide d'une chaise ou vous asseyant sur les toilettes)
- Insérez le tampon dans le rectum et retirez ensuite l'applicateur (le contact avec le sphincter peut éventuellement provoquer un réflexe de contraction, dans ce cas, attendre environ 8 à 10 secondes jusqu'à ce que le réflexe disparaisse et insérez ensuite le tampon)

Vous pouvez retirer RECAcare à tout moment avec le cordon de retrait et le jeter avec les déchets ménagers.

Utilisation et entretien



- Si vous le souhaitez, fixez le cordon de retrait sur la peau avec un adhésif adapté
- Retirez le tampon au plus tard après 20 heures d'utilisation
- Il n'est pas nécessaire de retirer le tampon lorsque vous urinez ni lorsque vous vous baignez
- Nettoyez l'applicateur après usage avec du savon neutre et rincez-le abondamment à l'eau
- RECAcare est un produit à usage unique

Composants : Tampon : mousse PVA | Cordon de retrait : 100% polyester

Conditionnement : 10 tampons

Taille et références

Art. No.	20.3	20.4	40.24	40.30	40.35	44.24	44.35	Applicateur 30.1
Ø / longueur mm	25/52	35/63	23/48	28/50	33/55	23/48	33/56	25/115



Consulter le mode d'emploi



Non réutilisable



Date de péremption



0197

Contre-indications

Ne pas utiliser le produit dans les cas suivants :

- Saignements d'origine inconnue
- Inflammation aiguë de la région intestinale
- Douleurs inexplicables au niveau de l'abdomen ou perforation de l'intestin

Effets secondaires

Lors de l'utilisation du tampon RECAcare, il arrive que l'on ressente une sensation de pression. Elle disparaît généralement au bout de 3/4 jours et définitivement après le retrait du tampon.

En cas de réactions indésirables ou de symptômes inhabituels, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit et consultez un professionnel de santé.

Avertissements

Veuillez respecter le mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures causées par une utilisation non-conforme. Produit à usage unique : si le produit est réutilisé, les normes d'hygiène nécessaires ne peuvent plus être garanties.

Fabriqué par :



Gustav-Schickedanz-Str.8
D-90762 Furth, Allemagne
+49 911 7406620
info@recamed.de
www.recamed.de



Distribution France :



MétanoïaSanté

Métanoïa Santé
2 Rue Léon Patoux
51100 Reims
+33 9 72 63 09 05
contact@metanoiasante.com
www.metanoiasante.com

