

- **AblaProtect** est **non irritant** pour la peau et les muqueuses, **non allergisant**. Il est **biocompatible**.
- **AblaProtect** est un dispositif médical qui ne contient **pas de principe actif** au sens pharmacologique du terme.
- **AblaProtect** est utilisable sur tous types de peaux sur toute la surface corporelle.

ABSENCE D'EFFICACITÉ

- Positionnement du produit sur peau non sèche.
Une peau humide est un frein à la pénétration du produit.
- Positionnement du produit sur peau non propre.
Une substance indésirable présente à la surface de la peau peut être entraînée par le produit dans l'épiderme (effet drainant) d'où possible aggravation des troubles.
- Lavage de peau immédiatement après étalement du produit.
Le polymère n'a pas eu le temps de se positionner.
- Positionnement du produit insuffisant.
Une seule fois par jour, irrégulièrement, sur trop courte durée (2 ou 3 jours), interruptions, abandon.
- **Malgré tout**, il se peut que dans **quelques cas** **AblaProtect** ne donne **pas les résultats escomptés...**

COMPOSANTS: Mhevozyx®, Aqua, Butane (and) propane, Diméthicone. Polysorbate 20, TEA, Argania spinosa kernel oil, Anthemis nobilis, Tanacetum anuum.

AblaProtect.fr

60 ml ACL: 6008364
EAN: 3 401060 08364 9



8 rue des Roses
51140 Jonchery sur Vesle



Tout spray entamé peut être utilisé sans risque jusqu'à la date de péremption



03 26 48 59 72

Disponible en pharmacie

www.metanoiasante.com



AblaProtect



Protection et soin cutané
des moignons à
l'intérieur des manchons
de prothèses



MetanoiaSanté

PROPRIÉTÉS

- Non occlusif, non filmogène, non gras.
- Résiste à des lavages répétés.
- Durée d'action, de 3 à 7 heures en fonction de l'état de la peau.
- N'empêche pas l'adhésion des pansements (attendre quelques instants la pénétration du produit).
- Un usage à long terme ne présente aucun inconvénient.

PEAUX CONCERNÉES

- Peaux saines à très réactives du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.
- Soins sur peaux altérées ou lésées.

INDICATIONS

- Renforce la résistance de l'épiderme aux agressions chimiques, physiques et biologiques.
- Utilisable sur toute la surface corporelle.


SPÉCIFICITÉ

- **AblaProtect** est doux par son aspect, par sa galénique, par son innocuité. Il agit avec le temps et dans le temps, respectant le cycle naturel de la peau.



- Protection de la peau des moignons à l'intérieur des manchons de prothèses,
- Réduit les risques liés aux frottements,
- Régule la transpiration, réduit les effets de la macération.
- Compatible avec tous types de manchons.

MODE D'ACTION

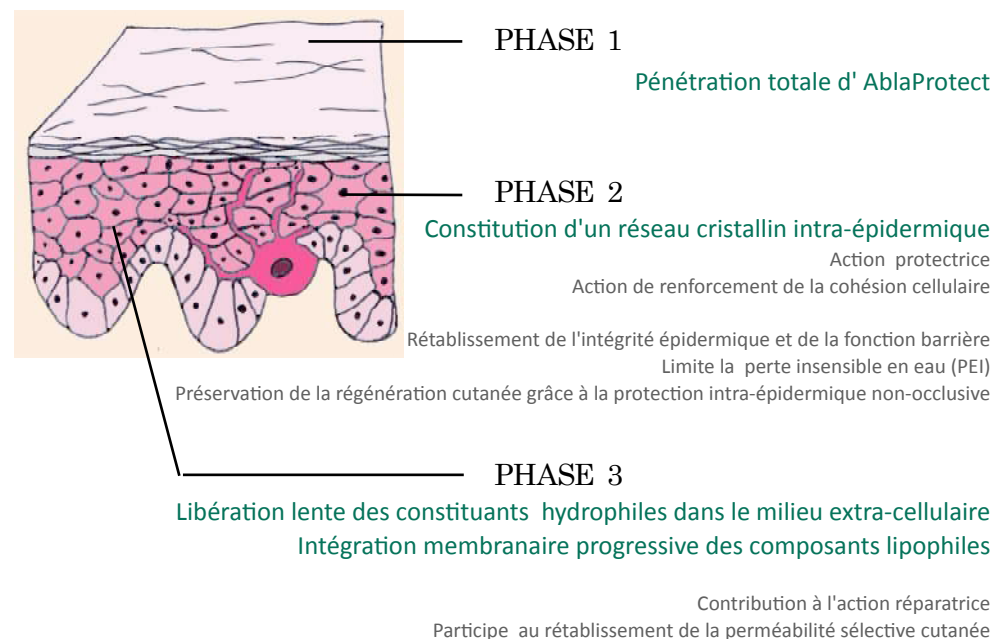

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur peau propre et sèche.
- A raison de deux à trois applications par jour.
- Tenir le spray tête en bas et extraire une noix de mousse en appuyant légèrement sur le diffuseur.
- Appliquer sur la zone à traiter, faire pénétrer en massant doucement.
- Si la zone est sensible ou abîmée, tapoter avec la boule pour déposer un peu de produit, attendre quelques instants, masser doucement avec le reste du produit.



Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions sur l'étiquette.

Respecter les précautions d'emploi.

En cas de doute, consultez votre médecin spécialiste.